

Indikationer

Dette produkt er beregnet til brug under ortodontisk behandling.

Kontraindikationer

- Patientens manglende evne eller vilje til at samarbejde/følge behandlingsplanen
- Patient med utilstrækkelig mundhygiejne
- Kendte allergier over for komponenter eller materialer i systemet
- Sygdomme eller underliggende tilstande, der udelukker ortodontisk behandling
- Eksisterende rodresorption

Materialer

Latexfrie ligaturringe er fremstillet af polyesterbaseret termoplastisk polyurethan (TPU)

Advarsler og forholdsregler

- Produktet har begrænset holdbarhed og skal anvendes inden udløbsdatoen på etiketten/emballagen.
- Informér patienten om materialerne i enheden før brug samt risiko for allergi/overfølsomhed. Fjern straks apparatet ved allergisk reaktion.
- Følg alle regionale og nationale standarder for brug af ortodontiske apparater.
- Brug ikke produkter, der er beskadigede eller ikke opfylder mærkningskravene.

Generel information til tandlæge/ortodontist

- Ortodontisk uddannelse i standardprocedurer afgør valg af instrumenter
- Bortskaffelse skal ske i henhold til regionale og nationale regler
- Ligaturringe placeres over bracket og buetråd med passende instrument
- Leveres rene men ikke sterile