

Reliance

GEL ETCHANT IN SYRINGE

Indikationer for anvendelse: Reliance Gel Etch er en 37% fosforsyre (H_3PO_4) fortykket med polymere og beregnet for brug på tandemalje som forberedelse for pålimning.

Brugsanvisning:

1. Fjern den hvide hætte ved at skrue den af.
2. Påsæt en spids og drej mod højre indtil den låser fast.
3. Isolér, om muligt, tanden/tænderne. Påfør Gel Etch direkte fra sprøjten på hele et område limen skal binde på. **Lad sidde i 30 sekunder.**
 ⚠️ **FORSIGTIG:** Undgå Gel Etch kommer i kontakt med det bløde væv.
4. Skyl grundigt til der ikke er ses spor af Gel Etch på emaljen og tør med luftsprøjten
5. Når proceduren er færdig, fjern den påsatte spids ved at dreje den mod venstre, kasser spidsen, påsæt igen den hvide hætte.



ADVARSEL: Gel Etch (indeholder fosforsyre) må ikke komme i kontakt med øjne eller hud. VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktklinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Søg omgående lægehjælp. VED KONTAKT MED HUN OG ANDET VÆV: Skyl med vand i flere minutter. Skader kan opstå, hvis Gel Etch forbliver i kontakt med hud og andet blødt væv i længere tid.

BEMÆRK: GENBRUG IKKE SPRØJTEN, HVIS DEN BLIVER KONTAMMINERET. UNDGÅR KONTAKT MELLEML DEN GENANVENDELIG DEL OG PATIENTENS MUND. BRUG NYE OG RENE HANDSKER. BENYT OVERTRÆK ELLER ANDEN FUNGERENDE BARRIERE FØR HVER PATIENT. SPIDSERNE ER IKKE GENANVENDELIGE. NY SPIDS SKAL PÅSÆTTES FØR HVER PATIENT.



TEMPERATUROMRÅDE: Opbevares ved rumtemperatur (15-30°C)

GENBESTILLING: REF# EGSS



RELIANCE®
ORTHODONTIC
PRODUCTS

1540 West Thorndale Ave., Itasca, IL 60143 U.S.A.
1-800-323-4348 •
www.RelianceOrthodontics.com



Scan for more information

Check out our new learning
platform Reliance U!
www.RelianceU.tech

Made in the USA

EC

REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

MD

Australian Sponsor:
Emergo Australia
201 Sussex St.
Darling Park
Tower II, Level 20,
Sydney, NSW 2000
Australia