

Vejledning for korrekt brug, rengøring og vedligeholdelse af tænger

1



Tænger må kun bruges til det formål de er lavet til.

2



Efter brug desinficeres tængerne grundigt med spray eller iblødsætning iht. klinikens hygiejnev vejledning.

3a



Rengør under løbende vand og med en blød nylonbørste (Læs også tillæg nederst)

3b



Vask tængerne i dentalopvasker med brug af ph-neutralt opvaskemiddel. Tag tængerne ud straks programmet er slut.

4



Skyl tænger og især hængsler med destilleret vand.

5



Tør tængerne og især hængslerne med klinikens trykluft.

6



Efterse for slitage og rust. Slidte og rustne instrumenter bør fjernes fra fungerende instrumenter.

7



Påfør en lille smule højtemperaturolie (990) til hængslet og evt. hårdmetal-dele.

8



Autoklaver tængerne i fuldt åben position. Tag tængerne ud straks programmet er slut.

BEMÆRK: Instrumenter med udskiftelige dele skal, hvis muligt, have delene afmonteret under rengøring. Hulrum (efter disse) skylles 5 gange med en engangssprøjte (minimum 50 ml demineraliseret vand) Benyttes ultralydsrensere, skal hulrum/kanaler placeres i en vinkel, så luftlommer kan evakuere