


Cavex Alginate Mixer II

Automatisk Alginat Blander

Betjeningsvejledning

Læs venligst denne vejledning inden apparatet tages i brug.

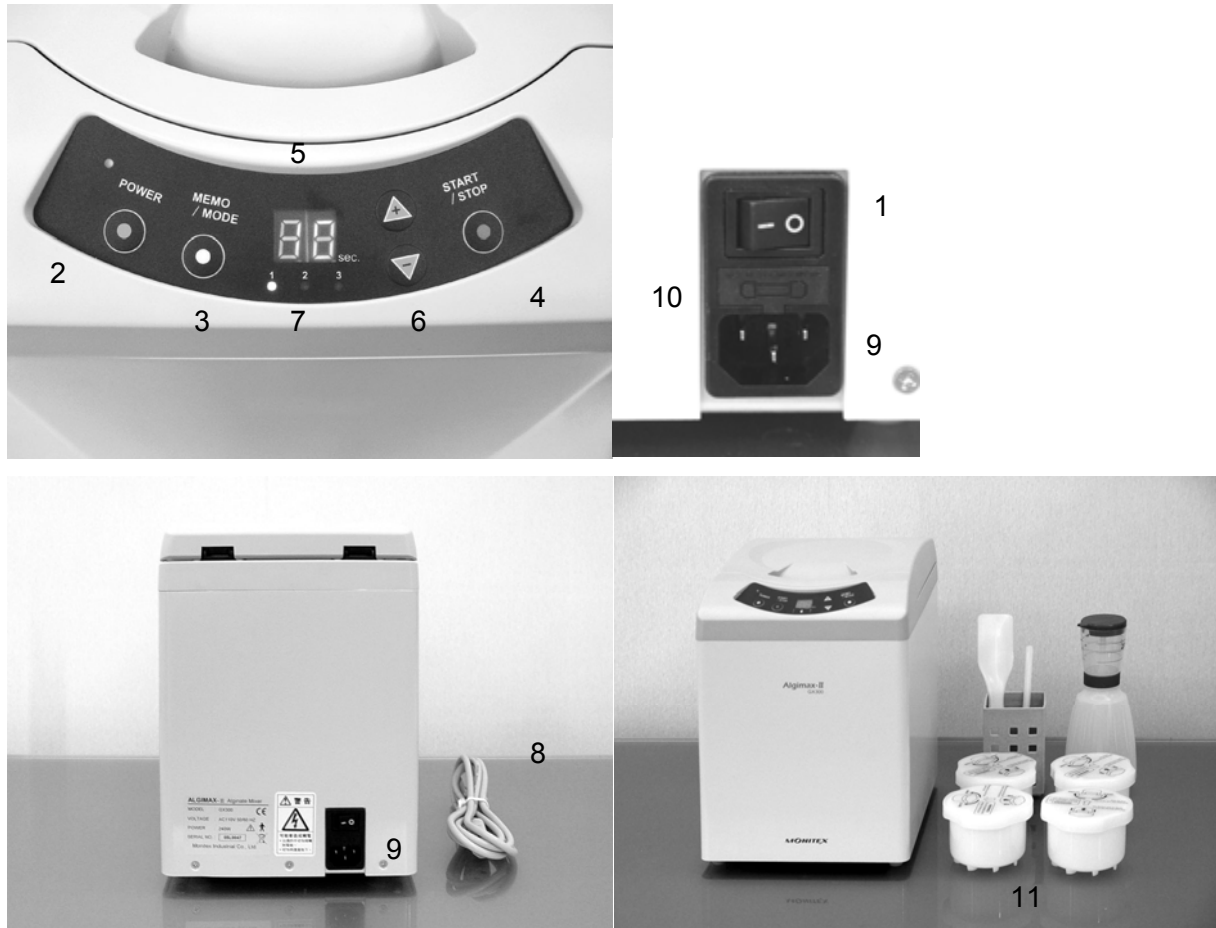

Alginate Mixer II, med tilbehør:

- 1) Hovedafbryder
- 2) Tænd/sluk (standby)
- 3) Hukommelsesknop (Memo/Mode)
- 4) Start/Stop
- 5) Display
- 6) Valg af blandetid
- 7) Valgt program (1/2/3)
- 8) Strømledning
- 9) Apparatstik (strøm)
- 10) Sikringsholder
- 11) Blandekopper

Daglig brug

1. Tænd for Alginat Mixer II

Tænd for maskinens indbyggede strømforsyning med hovedafbryderen (1) på maskinens bagside.

Tryk herefter på Tænd/sluk knappen (2 Power) på betjeningspanelet. Displayet vil lyse op og vise den valgte blandetid.

Skift mellem de gemte blandetider for program 1,2 og 3 ved at trykke gentagne gange på hukommelsesknappen (3 Memo/Mode)

N.B. Maskinen leveres forprogrammeret med de følgende tider:

1 = 8 sekunder

2 = 10 sekunder

3 = 12 sekunder

Alginat blandet i maskinen vil typisk afbinde hurtigere end alginat blandet i hånden. Dette skyldes maskinens meget kraftige blanding.



2. Fyld den ønskede mængde alginat i en blanderkop

Tilføj den nødvendige mængde vand iht. Producentens anvisninger.

Omrør kort pulver og vand med blanderpinden, eller sæt låget på blanderkoppen og ryst den et par gange.

N.B.

1.

Det totale indhold i blanderkoppen af vand og pulver må ikke overstige 100 gram.

2.

Det er vigtigt at låget på blanderkoppen sættes korrekt fast og drejes så det låser. I modsat fald kan alginat trænge ud i maskinen og påvirke funktionen.

3.

Udskift låg og/eller blanderkop når låget ikke længere kan drejes sikkert fast efter slitage.

4. Efter behov kan alginat blandes med mindre vand.

Maskinens meget kraftige blanding giver mulighed for at reducere vandmængden og derved frembringe en tykkere aftryksmasse. Dette kan bestemmes med forsøg på klinikken.

3. Luk blanderkoppen sikkert



4. Start maskinen

Sæt den fyldte og lukkede blandekop i maskinens holder.

Luk maskinens låg.

(Ellers vil maskinen ikke kunne starte)

Tryk på Start/Stop knappen (4)

Maskinen vil nu køre i det antal sekunder displayet viser. Du kan manuelt afbryde maskinen ved igen at trykke på Start/Stop (4)

N.B.

Forsøg ikke at åbne låget INDEN maskinen er helt stoppet.

Låget er forsynet med en sikkerhedsspærre, der kan tage skade, hvis låget forsøges åbnet med magt.



5 Indstil de optimale blandetider

Hvis du ønsker at ændre tiderne for program 1, 2 og 3:

- Brug hukommelsesknappen (3 Memo/Mode) til at program.
- Indstil den ønskede tid med knapperne for valg af blandetid (6 + / -)
- Hold nu de samme to knapper trykket ned på samme tid. Maskinen vil give to høje toner og displayet vil blinke. Tiden er hermed programmeret.



Vedligeholdelse

1. Blandekopper


Efter hver blanding rengøres både blandekop og låg.

Hærdet alginat er let at fjerne. Brug papir eller en klud til at tørre overfladerne rene.

Brug ikke metal eller skarpe genstande. Dette vil ridse overfladerne.

Sørg for at hullet i midten af låget ikke er tilstoppet.

Med tiden kan blandekopperne tage farve fra alginaten. Dette har ingen betydning for deres funktion.

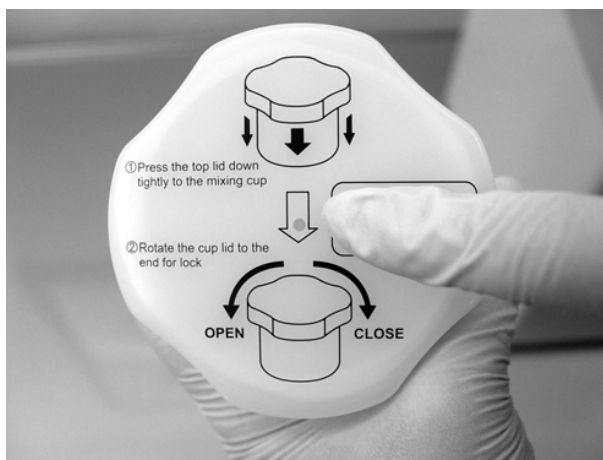

2. Maskinen

Aftørres med en fugtig klud og evt. neutralt rengøringsmiddel.

Brug aldrig opløsningsmidler.

Specifikationer

Spænding: Vekselstrøm AC 220-230 Volt 50/60 Hz

Strømforbrug: 220 W

Rotationshastighed: 2.900 o/min (50 Hz)

Dimensioner BxDxH): 205 x 250 x 285 mm

Vægt: 16 kg (35.2 lb)



Telegrafvej 5, opg. 1
2750 Ballerup

Telefon: **44 47 79 13**
E-mail: mail@zibrand.dk
CVR: 34 85 83 65